

## A-PRF + Tubes 10ml Instructions

Ce dispositif est un produit à usage unique, il ne doit pas être réutilisé.  
Ce tube de prélèvement sanguin est utilisé pour la préparation du A-PRF+™  
Le tube de A-PRF+™ est stérile, sous vide, sans additifs ni anticoagulants.  
Il est contenu dans un emballage unique.



### Procédure :

- Sortir le tube de prélèvement sanguin de son emballage
- Assurez-vous de l'intégrité de l'emballage, si l'emballage est déjà ouvert ou endommagé, veuillez le jeter et prendre un produit intact.
- Branchez le tube dans le corps de pompe
- Le tube se remplit et s'arrête automatiquement lorsqu'il est plein (tube sous vide) . Contenance 10 mL.
- Débranchez le tube et passer au suivant, lorsque le nombre de tubes désiré est atteint, les placer dans la centrifugeuse.
- Les tubes sont prêt à être centrifugés. Pour la vitesse de rotation et le temps de centrifugation, nous contacter.  
Nous vous communiquerons les réglages adaptés à votre centrifugeuse.

**NB:** Lorsque la procédure A-PRF+ est terminée, veuillez mettre les tubes usagés dans les containers prévus à cet effet.

### Précautions :

- Le bon fonctionnement de ce dispositif, n'est assuré que si les instructions d'utilisation sont respectées
- Ne faites aucune action qui pourrait porter atteinte au dispositif.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel avant utilisation, si l'emballage est endommagé, ne pas utiliser.
- En cas d'exposition lors d'une blessure demander un avis médical.
- La réutilisation du produit est strictement interdite, elle peut entrainer des infections dangereuses pour la santé, voir même la mort.
- Dans le cas de patients, hémophiles, épileptiques etc., une attention particulière s'impose lors du prélèvement.



1. Munissez-vous des tubes de prélèvement A-PRF+™



2. Réalisez le prélèvement sanguin, remplissez le nombre de tubes nécessaires



3. Placez les tubes dans la centrifugeuse.

**LOT** Numéro de lot

Date de fabrication

Dispositif à usage unique  
Ne peut pas être réutilisé

**CE**

Date de péremption : Le produit peut être utilisé jusqu'à la fin du mois indiqué

**STERILE R** Stérilisation aux rayons gamma

Non toxic - Non pyrogenic