

## A-PRF + Provetta 10ml Istruzione

Dispositivo monouso. Non riutilizzare.  
 Provetta per prelievo di sangue per il preparato A-PRF+™.  
 La provetta è sterile, sottovuoto, priva di additivi o anticoagulanti.  
 In confezione singola.

**A-PRF**<sup>™</sup>  
 CHOUKROUN



### Procedura:

- Estrarre la provetta dalla confezione.
- Assicurarsi dell'integrità della confezione. Se la confezione risulta aperta o danneggiata, gettare la provetta e prelevare un prodotto integro.
- Inserire la provetta nel portaprovette.
- La provetta viene riempita; il riempimento si ferma automaticamente quando la provetta è piena (provette sottovuoto). Capacità: 10 ml.
- Estrarre le provette e passare alla fase successiva. Quando si raggiunge il numero di provette desiderato, inserirle nella centrifuga.
- Le provette sono ora pronte per la centrifugazione. Per impostare RPM e durata della centrifugazione siete pregati di contattarci. Vi forniremo le impostazioni più adatte alla vostra centrifuga.


Nota bene: Una volta completata la procedura A-PRF +, porre immediatamente le provette usate nei contenitori forniti allo scopo.

### Precauzioni:

- Il funzionamento corretto del dispositivo viene assicurato solamente se si seguono le istruzioni.
- Non effettuare operazioni che potrebbero danneggiare il dispositivo;
- Controllare l'integrità della singola confezione prima dell'uso; se la confezione risulta danneggiata non usare il prodotto.
- In caso di ferita o lesione da ago con esposizione al prodotto, consultare il medico.
- Il riutilizzo del prodotto è severamente vietato, in quanto potrebbe causare infezioni pericolose per la salute o perfino il decesso.
- Prestare particolare attenzione in caso di prelievo su pazienti emofilici, epilettici o con altre patologie.



1. Prelevare le provette per prelievo di sangue A-PRF+™.

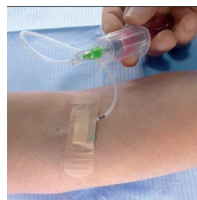



2. Effettuare il prelievo di sangue, riempiendo il numero richiesto di provette.




3. Inserire le provette nella centrifuga

**LOT** Numero di lotto

 Data di fabbricazione

 Prodotto monouso  
Non riutilizzare

**CE**

 Data di scadenza: È possibile usare il prodotto fino alla fine del mese di scadenza

**STERILE R** Sterilizzazione a Raggi Gamma

Non tossico - Apirogeno