

A-PRF + Tüp 10ml Talimatlar

Bu cihaz tek kullanımlık bir üründür. Yeniden kullanılmamalıdır.
Bu kan alma tüpü, A-PRF+™ preparasyonu için kullanılır.
Tüp, katkı maddesi veya anti-koagülan içermeyen steril, düz vakumludur.
Tek bir pakettedir.

A-PRF™
CHOUKROUN

**Prosedür:**

- Tüpü ambalajından çıkarın.
- Ambalajın bütünlüğünden emin olun. Paket açılmışsa veya hasar gördüyse, lütfen atın ve intakt bir ürün alın.
- Tüpü pense takın.
- Tüp dolduğunda otomatik olarak durur (vakum tüpleri). Kapasite: 10 ml.
- Tüpleri çıkarın ve bir sonraki adıma geçin. İstenen sayıda tüpe ulaşıldığında, bunları santrifüj içine yerleştirin.
- Tüpler santrifügasyon için hazırdır. RPM'yi ve santrifügasyon süresini ayarlamak için lütfen bizimle iletişime geçin. Santrifüjünüze uyarlanmış ayarları size iletacağız.


Not: A-PRF+ işlemi tamamlandıktan sonra lütfen kullanılmış tüpleri muhafazaları için sağlanan kaplara koyun.

Önlemler:

- Bu cihazın düzgün bir şekilde çalışması ancak talimatlara uyulması durumunda sağlanır.
- Cihazı etkileyebilecek herhangi bir işlem yapmayın;
- Paketi kullanmadan önce kişinin bütünlüğünü kontrol edin, eğer paket hasar görürse kullanmayın.
- Bir yaralanma veya iğne batması sırasında maruz kalınması halinde, tıbbi yardım isteyin.
- Ürünün tekrar kullanılması kesinlikle yasaktır; sağlık açısından tehlikeli enfeksiyonlara ve hatta ölüme neden olabilir.
- Hemofili, epilepsi hastaları vb. gibi durumlarda kan alımı sırasında özel dikkat gösterilmelidir.



1. A-PRF+™ kan alma tüplerini alın

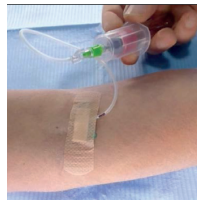

2. Kanı alın, gerek duyulan kadar tüpü doldurun.



3. İüpleri santrifüjün içine yerleştirin

LOT Lot numarası

Üretim tarihi

Tek kullanımlık ürün yeniden kullanılmamalıdır

CE

Son kullanma tarihi: Ürün ay sonuna kadar kullanılabilir

STERILE R Gamma sterilizasyonu

Toksik olmayan - pirojenik olmayan