

i-PRF Rohr 10ml Anleitung

Dieser Artikel ist ein Einmalprodukt und nicht wiederverwendbar.
 Das Blutentnahmeröhrchen wird für die i-PRF™ -Vorbereitung verwendet.
 Das Blutentnahmeröhrchen ist steril, mit Vakuum, ohne Zusatzstoffe oder Antikoagulantien.
 Einzelverpackung.

i-PRF
 CHOUKROUN



Verfahren:

- Blutentnahmeröhrchen aus der Verpackung entnehmen.
- Achten Sie auf die Unversehrtheit der Verpackung. Wenn das Paket geöffnet oder beschädigt ist, entsorgen Sie es bitte und nehmen ein intaktes Produkt.
- Stecken das Blutentnahmeröhrchen in den Butterfly Adapter.
- Das Blutentnahmeröhrchen wird gefüllt und stoppt automatisch, wenn es voll ist (Vakuümrohrchen). Fassungsvermögen: 10 ml.
- Entfernen Sie das Blutentnahmeröhrchen und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn die gewünschte Anzahl von Röhrchen erreicht ist, stellen Sie diese in die Zentrifuge.
- Die Röhrchen sind zum Zentrifugieren bereit. Um die RPM und die Dauer der Zentrifugation einzustellen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir geben Ihnen die für Ihre Zentrifuge angepassten Einstellungen.


Hinweis: Nach Beendigung des Vorgangs i-PRF sind die gebrauchten Röhrchen sofort in die dafür vorgesehenen Behälter zu stellen.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Die ordnungsgemäße Funktion dieses Artikels ist nur gewährleistet, wenn die Anweisungen befolgt werden.
- Nehmen Sie keine Maßnahmen vor, die den Artikel beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie die Unversehrtheit der einzelnen Produkte, bevor Sie die Verpackung öffnen. Wenn die Verpackung beschädigt ist, nicht verwenden.
- Bei Kontakt mit der Nadel oder Verletzungen ärztlichen Rat einholen.
- Die Wiederverwendung des Produkts ist streng verboten. Dieses kann zu gefährlichen Ansteckungen oder sogar zum Tod führen.
- Bei Hämophiliepatienten, Epileptika, etc. ist besondere Aufmerksamkeit bei der Blutentnahme erforderlich.



1. Nehmen Sie das Blutentnahmeröhrchen i-PRF™.

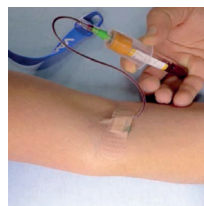

2. Blut entnehmen bis Sie die erforderliche Anzahl von Blutentnahmeröhrchen erhalten haben.




3. Die Blutentnahmeröhrchen in die Zentrifuge stellen

LOT Chargennummer

 Herstellungsdatum

 Einmalprodukt
Nicht wiederverwendbar

CE

 Verfallsdatum: Produkt kann bis zum Ende des Monats verwendet werden

STERILE R Gamma-Sterilisation

Nicht toxisch - Nicht pyrogen