

i-PRF Tubul 10ml Instrucțiuni

Acest dispozitiv este pentru unica folosință/utilizare. A nu se reutiliza.
Acest tub pentru colectarea sângelui este folosit pentru prepararea i-PRF.
Tubul este steril, vidat, fără (nu conține) aditivi sau/si anticoagulanți.
Ambalat individual.

i-PRF
CHOUKROUN



Procedura (Protocol de lucru)::


- Scoateți tubul din ambalajul sau.
- Asigurați-va ca ambalajul este intact/integru (nedeteriorat). Dacă ambalajul este deschis sau deteriorat, va rugăm să îl aruncați (sa nu îl utilizați) și să folosiți un alt produs care este ambalat corespunzător (intact).
- Scoateți tubul din holder.
- Tubul este vidat și se umple automat până la nivelul maxim necesar. Capacitate: 10 ml.
- Îndepărtați tubul și conectați-l pe următorul. Când s-a obținut numărul dorit de tuburi, introduceți-le în centrifugă.
- Tuburile sunt gata (pregătite) pentru centrifugare. Pentru a seta viteza și durata centrifugării, va rugăm să ne contactați.

Va vom furniza/livra setările adaptate centrifugii dvs.

N.B.: Când ați finalizat procedura de pregătire i-PRF, va rugăm să introduceți imediat tuburile folosite în containerul furnizat special pentru acest scop.

Precauții:

- Funcționarea corespunzătoare a acestui dispozitiv este condiționată de respectarea instrucțiunilor de utilizare.
- Nu efectuați manevre/manopere care ar putea afecta negativ dispozitivul
- Verificați integritatea ambalajelor individuale înainte de utilizare. Dacă constatați nereguli, evitați utilizarea lor.
- În cazul unei răniri (înțepare cu acul), solicitați consult și tratament medical competent.
- Reutilizarea acestor produse este absolut interzisă; poate cauza infecții deosebit de grave sau/si deces.
- În cazul pacienților hemofilici, epileptici etc. sunt necesare măsuri speciale în timpul recoltării.

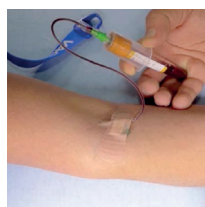

1. Pregătiți tubul colector i-PRF™.

2. Efectuați recoltarea; umpleți numărul de tuburi necesar.

3. Introduceți tuburile în centrifugă



Număr Lot



Data producției



Produs de unică folosință.
A nu se reutiliza.



Data expirării: Produsul poate fi utilizat până la finalul lunii



Sterilizat cu raze Gamma

Non-toxic, Non-pirogenic