

i-PRF + Tüp 10ml Talimatlar

Bu cihaz tek kullanımlık bir üründür. Yeniden kullanılmamalıdır.
Bu kan alma tüpü, i-PRF™ preparasyonu için kullanılır.
Tüp, katkı maddesi veya anti-koagülan içermeyen steril, düz vakumludur.
Tek bir pakettedir.

i-PRF
CHOUKROUN

**Prosedür:**

- Tüpü ambalajından çıkarın.
- Ambalajın bütünlüğünden emin olun. Paket açılmışsa veya hasar gördüyse, lütfen atın ve intakt bir ürün alın.
- Tüpü pense takın.
- Tüp dolduğunda otomatik olarak durur (vakum tüpleri). Kapasite: 10 ml.
- Tüpleri çıkarın ve bir sonraki adıma geçin. İstenen sayıda tüpe ulaşıldığında, bunları santrifüj içine yerleştirin.
- Tüpler santrifügasyon için hazırdır. RPM'yi ve santrifügasyon süresini ayarlamak için lütfen bizimle iletişime geçin. Santrifüjünüze uyarlanmış ayarları size iletacağız.


Not: i-PRF işlemi tamamlandıktan sonra lütfen kullanılmış tüpleri muhafazaları için sağlanan kaplara koyun.

Önlemler:

- Bu cihazın düzgün bir şekilde çalışması ancak talimatlara uyulması durumunda sağlanır.
- Cihazı etkileyebilecek herhangi bir işlem yapmayın;
- Paketi kullanmadan önce kişinin bütünlüğünü kontrol edin, eğer paket hasar görürse kullanmayın.
- Bir yaralanma veya iğne batması sırasında maruz kalınması halinde, tıbbi yardım isteyin.
- Ürünün tekrar kullanılması kesinlikle yasaktır; sağlık açısından tehlikeli enfeksiyonlara ve hatta ölüme neden olabilir.
- Hemofili, epilepsi hastaları vb. gibi durumlarda kan alımı sırasında özel dikkat gösterilmelidir.



1. i-PRF™ kan alma tüplerini alın

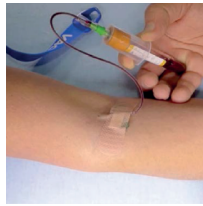

2. Kanı alın, gerek duyulan kadar tüpü doldurun.



3. Lüpleri santrifüjün içine yerleştirin

LOT Lot numarası

Üretim tarihi

⊗ Tek kullanımlık ürün yeniden kullanılmamalıdır

CE

📅 Son kullanma tarihi: Ürün ay sonuna kadar kullanılabilir

STERILE R Gamma sterilizasyonu

Toksik olmayan - pirojenik olmayan