

A-PRF + Tubo 10ml Instruções

Este dispositivo é um produto de uso único. Ele não deve ser reutilizado.
Este tubo de recolha de sangue é usado para a preparação A-PRF+™.
O tubo é estéril, com vácuo simples, sem aditivos ou anticoagulantes.
Tubo unico.

A-PRF[™]
CHOUKROUN



Procedimento:

- Retire o tubo da embalagem.
- Certifique-se se a embalagem está em bom estado. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, por favor, não use, use apenas um produto intacto e inviolado.
- Insira o tubo no suporte de colheita, cateter.
- O tubo enche e pára automaticamente quando está cheio (tubos de vácuo). Capacidade: 10 ml.
- Retire o tubo e introduza o seguinte. Quando o número desejado de tubos é atingido, deverá colocá-los na centrífuga.
- Os tubos estão prontos para a centrifugação. Para definir RPM e tempo de centrifugação, entre em contato conosco.

Damos-lhe as configurações adaptadas a sua centrífuga.


NB: Quando o procedimento A-PRF + estiver concluído, por favor, coloque imediatamente os tubos utilizados nos recipientes previstos para este efeito.

Precauções:

- O bom funcionamento deste dispositivo só é assegurada se as instruções forem seguidas.
- Não faça qualquer ação que possa afetar o dispositivo;
- Verifique a integridade da embalagem antes de usar, se a embalagem estiver danificada, não use.
- Em caso de lesão com agulha, deverá consultar um médico.
- A reutilização do produto é estritamente proibida; pode levar a infecções perigosas para a saúde, ou mesmo a morte.
- No caso de pacientes com hemofilia, epiléticos, etc., é necessária atenção especial é necessário durante o protocolo.



1. Retire os tubos de colheita de sangue A-PRF+™

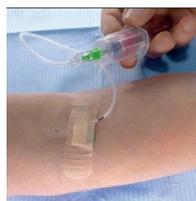

2. Faça a colheita, e use o número de tubos que considere necessário.



3. Coloque os tubos na centrífuga

LOT Número de lote

🏭 Data de fabricação

ⓧ Produto de uso único
Não devem ser reutilizados

CE

🕒 Prazo de validade: O produto pode ser usado até o final do mês

STERILE R Esterilização Gamma

Não tóxico - Não pirotécnicas