

i-PRF Buisjes 10ml Instructies

Dit artikel is een product voor eenmalig gebruik. Het mag niet worden hergebruikt. Deze bloedafname buisjes zijn te gebruiken voor i-PRF™ voorbereiding. De buis is steriel, gewoon vacuüm, zonder toevoegingen of anti-stollingsmiddelen. Apart verpakt.

i-PRF
CHOUKROUN



Procedure:

- Buis uit de verpakking halen.
- Zorg ervoor dat de verpakking intact is. Als de verpakking beschadigd of geopend is, neem dan een nieuw intact product.
- Plaats de buis in de huls (van de vacutainer).
- De buis wordt gevuld en stopt automatisch, wanneer vol (vacuümbuizen). Capaciteit: 10 ml.
- Verwijder buis uit huls en neem de volgende. Wanneer het gewenste aantal buizen is bereikt, plaats ze dan in de centrifuge.
- Buizen zijn klaar om te centrifugeren. Om toeren p/m en het tijdstip van het centrifugeren in te stellen, neem dan contact met ons op.

Wij geven u de instellingen aangepast aan uw centrifuge.


NB: Als de i-PRF procedure voltooid is, kunt u onmiddellijk de gebruikte buizen in de daarvoor bestemde containers plaatsen (milieubox).

Voorzorgsmaatregelen:

- De goede werking van dit apparaat is slechts verzekerd wanneer de instructies worden opgevolgd.
- Onderneem geen actie die het apparaat nadelig kunnen beïnvloeden;
- Controleer of de verpakking intact is, als de verpakking beschadigd is, niet gebruiken.
- Bij blootstelling of prik accident, een arts raadplegen.
- Hergebruik van het product is ten strengste verboden; kan leiden tot gevaarlijke infecties voor de gezondheid of zelfs de dood.
- Bij hemofiliepatiënten, epilepsie enz, speciale aandacht tijdens bloedafname.



1. Gebruik de bloedafnamebuisjes van i-PRF™.

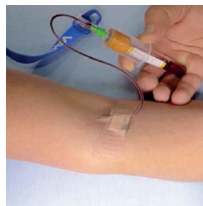

2. Neem bloedafname, vul het gewenste aantal buizen.




3. Plaats de buizen in de centrifuge

LOT Lotnummer

 Fabricage datum

 Eénmalig gebruik, product mag niet worden hergebruikt

CE

 Vervaldatum: Het product kan worden gebruikt tot het einde van de maand

STERILE R Gamma sterilisatie

Niet giftig - Niet-pyrogeen