

i-PRF Røret 10ml Brugervejledning

Dette produkt er til engangsbrug. Det må ikke genbruges.
 Produktet anvendes til blodudtagning i forbindelse med fremstillingen af i-PRF™.
 Røret er sterilt og indeholder kun almindeligt vakuum, uden tilsætnings- eller antikoagulerede stoffer.
 Produktet er pakket enkeltvis.

i-PRF
 CHOUKROUN



Procedure:


- Tag røret ud af emballagen.
 - Tjek at emballagen ikke har været åbnet eller er beskadiget. I givet fald skal du smide det ud og tage et intakt produkt istedet.
 - Sæt røret i blodtapningensanordningensholder, således at kanylen inde i holderen penetrerer gummitoppen på røret
 - Røret fyldes og stopper automatisk, når det fyldt (vakuumsrør). Kapacitet: 10 ml.
 - Skift rør og fortsæt indtil det ønskedes antal rør er fyldt. Placere dem i centrifugen.
 - Rørene er klar til centrifugering. For at indstille RPM og tid for centrifugering, bedes du kontakte os, så vil vi give dig de indstillinger, der er tilpasset til din centrifuge.
- NB: Når centrifugeringen er afsluttet, skal du straks flytte rørene fra centrifugen over i en rørholder.

Forholdsregler:

- Følg anvisningen ovenfor og den korrekte anvendelse af denne enhed er sikret.
- Afvig ikke fra ovenstående, da det kan påvirke enheden.
- Kontroller at hvert enkelt rør er intakt, før du bruger det. Hvis det er beskadiget, skal du ikke bruge det.
- I tilfælde af en skade eller nålestik, søg lægehjælp.
- Genbrug af produktet er strengt forbudt; det kan føre til farlige infektioner til fare for den enkeltes sundhed, eller endog dødsfald.
- I tilfælde af hæmofilipatienter, epileptikere mv, er der behov for særlig opmærksomhed under blodudtagningen.



1. Tag blodopsamlingsrør i-PRF™.

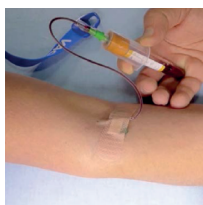


2. Lav blodudtagning, fyld det nødvendige antal rør.




3. Anbring glassene i centrifugen

LOT Lot nummer

 Fremstillingsdato

 Produkt til enkelt brug.
Må ikke genbruges

CE

 Udløbsdato: Produktet kan bruges indtil udgangen af måneden

STERILE R Gamma sterilisation

Ikke giftig - Non pyrogen